



# TECHNICAL WIN MEDICAL SUPPLIES LTD.

354 LADPRAO 86, TOWN IN TOWN, SRIVARA RD. BANGKAPI DISTRICT,  
BANGKOK 10310, THAILAND. TEL: 539-0180 (3 LINES) FAX: (662) 539-4563

## วิธีใช้ เครื่องและบำรุงรักษา เครื่องอบฆ่าเชื้อความแรงคนไอหน้า

(MODEL EAC - 2200, EAC - 3200, EAC - 4000 DH, EAC-4500V)

1. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำดื่ม ให้เต็ม STORAGE TANK
2. เปิดฝาเครื่อง หมุนน้ำ WATER VALVE ประมาณ 2 รอบ ให้สิ่งเกะกะคั้นน้ำในตู้อบจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งระดับน้ำใกล้จะล้นออกมา ให้ปิดวาล์ว
3. ตั้งสวิตช์อุณหภูมิที่ 121° C หรือ 132° C ความร้อนเหมาะสมจากตาราง
4. ตั้งเวลาในการฆ่าเชื้อที่ปุ่ม STERILIZATION TIMER ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หรือเวลา Sterilization

Changing timer non sterilization

เปลี่ยนเวลา

ชนิดสิ่งของที่จะฆ่าเชื้อ	อุณหภูมิที่เหมาะสม	เวลาฆ่าเชื้อ(นาที)
เครื่องมือที่ฆ่าเชื้อ	132°	3
เครื่องมือที่ฆ่าเชื้อ	132°	5
ผ้ากอซ, สาลี่	121°	20
เข็ม, เข็มฉีดยา	121°	20
ถุงมือ, วัสดุประเภทยาง	121°	15

5. ตั้งเวลาในการอบแห้งที่ปุ่ม DRYING TIMER ตามความต้องการ (15-30 นาที)
6. ใส่ช่องที่จัดการจะฆ่าเชื้อโรค, บล็อกประตู และหมุดด้านบล็อกระงับขา จนไฟแดงที่ตำแหน่ง POWER ติดขึ้น ให้หมุนแป้นเปิดเครื่องรอบแล้วหยุดหมุน
- \*7. ก่อนเปิดประตูต้องตรวจสอบว่าเข็มแสดงแรงดันที่ PRESSURE GAUGE อยู่ที่ตำแหน่ง 0 (ศูนย์ ศูนย์)
8. การอบฆ่าเชื้อโรคตามควรกระทำติดต่อกัน ควรจะรอวันไม่น้อยกว่า 5 นาที แล้วจึงปล่อยน้ำเข้าห้องอบ สำหรับอบครั้งต่อไป (การอบที่ติดต่อกันหรือปล่อยน้ำเข้าในห้องอบขณะเครื่องร้อน จะทำให้อายุการใช้งานของขดลวดความร้อนสั้นลง)
9. ควรเปลี่ยนน้ำในถังเก็บน้ำที่เค้น หรือเมื่อใช้เครื่องประมาณ 20 ครั้ง โดยกดออกสกรูที่ปลายสกรูข้างก้านล่างของตัวเครื่อง น้ำจะถูกถ่ายออกทางนี้

NOTE DOOR SWITCH จะต้องอยู่ที่ตำแหน่ง OFF และที่การอบฆ่าเชื้อ จะต้องตั้งที่ตำแหน่ง ON

ในกรณีที่ต้องการให้ทำการอบแห้งรวดเร็วขึ้น

เอกสารภายนอกที่ดูแลควบคุมของ ฝ่าย / กลุ่มงาน.....  
 หน่วยงาน.....  
 วันที่...../...../..... จำนวนหน้า.....  
 ประกาศใช้: 20/4/43

รหัสเอกสาร: Ex-DE-004	<input checked="" type="checkbox"/> ต้นฉบับ
	<input type="checkbox"/> สำเนาที่.....
นำมาใช้โดย	ทบทวนโดย
มอช อภิสิทธิ์	วิมลวิมล ธรรมวิมล
	อนุมัติโดย